


Før du begynder

Sådan kommer du i gang med din nye Aculas-HB laser


Forbind din Aculas-HB

Forbind din Aculas-HB med den vedlagte strømforsyning samt lasermodulerne.

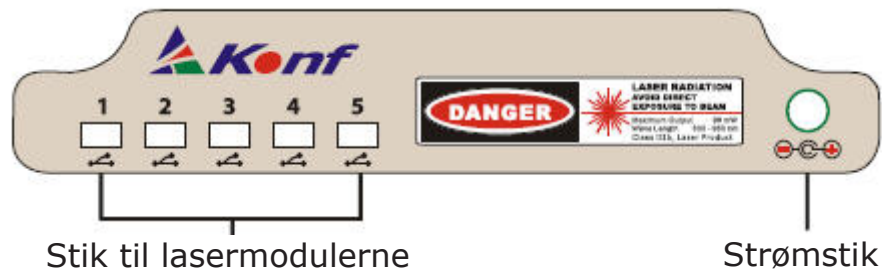

Funktion

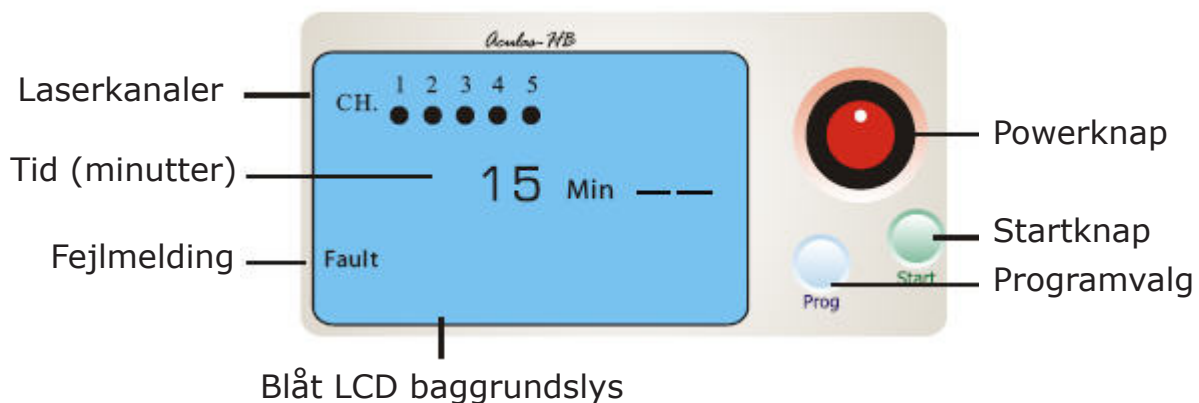


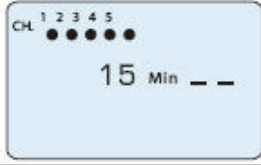

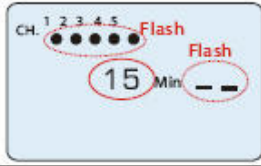
Tryk på den røde powerknap for at tænde, og find derefter den ønskede terapiprotokol via "prog"-knappen. Vent 3 sekunder indtil cirklene udfor CH. (channels - kanaler) bliver synlige. Tryk på den grønne startknap for at påbegynde behandlingen.



Før du begynder

Sådan kommer du i gang med din nye Aculas-HB laser

Funktion og LCD-skærmen

Operation			LCD Display
STEP	ACTION	PUSH	
1	Powerknap		
2	Programvalg	 Prog	
3	Start	 Start	
Fejl: (1) Fejlsignal (2) Kanalfejl Check de forbundne lasermoduler			