

SILVERFOX

2246BN/2246EBN

Ansigtsstol

Velkommen til at bruge vores produkter. A2
Læs brugervejledningen omhyggeligt, inden du bruger produkterne.
Vores virksomhed forbeholder sig ret til at forbedre designet og
ændre produkterne uden forudgående varsel.

1. Om denne vejledning


Denne vejledning må kun bruges som reference til betjening af denne specifikke model. Hvis vejledningen bruges til andre formål, påtager SILVERFOX sig ikke noget ansvar for eventuelle konsekvenser. Alle oplysninger i denne manual er beskyttet af ophavsret og må ikke kopieres eller oversættes uden skriftlig tilladelse fra vores firma SILVERFOX.

2. Advarsel

- Strømmen skal afbrydes, når der udskiftes elektriske komponenter eller vedligeholdes og rengøres maskiner.
- Stikket skal sættes i en stikkontakt, der er korrekt installeret og jordforbundet, for at forhindre risiko for brand og elektrisk stød.
- Stå ikke på dette udstyr.
- Lad ikke børn lege med udstyret, og placér det ikke et sted, hvor børn kan røre ved det. Juster ryglænet til den højeste position, når du forlader udstyret.
- Placer ikke udstyret på våde steder, såsom badeværelset, for at undgå elektrisk stød eller andre fejl. Hold også controllerne væk fra vand.
- Placer og betjen ikke udstyret på steder, hvor der males/belægges eller tilføres lit.
- Medmindre det overvåges eller instrueres af personale, der kan tage ansvar for deres personlige sikkerhed, må personer med fysiske handicap, taktile forstyrrelser, mentale forstyrrelser, manglende erfaring, sund fornuft eller børn ikke bruge udstyret.
- Kontakt distributøren, servicecentret eller relevant personale med passende færdigheder og erfaring for at få udstyret repareret, hvis stikket er beskadiget, for at undgå fare.
- Sørg for, at der ikke er noget tilgængeligt inden for rækkevidde under betjening af sengene. Betjeningen skal udføres af uddannede fagfolk.
- Original instruktion
-
-
-  Kun tilindendørsbrug

3. Forholdsregler

- Overhold sikkerhedsreglerne for betjening, produktet må ikke overbelastes, og sørg for, at produktets sikkerhedsudstyr er komplet og pålideligt, og fjern usikre faktorer i tide.
 - Stram bolte og møtrikker regelmæssigt for at undgå fejl forårsaget af løshed, glidning, vibrationer og fald.
 - Under vedligeholdelsen må operatøren ikke adskille nogen dele af sengen efter eget ønske.
 - Dette produkt skal bruges af en erfaren person, der er fortrolig med produktets struktur, ydeevne og instruktioner. Udfør regelmæssig vedligeholdelse.
 - Læs denne manual omhyggeligt inden installation, betjening og justering. Opbevar den på et sikkert sted.
 - Dette produkt må ikke bruges til ensidig eller enkeltpunktsbelastning.
 - Dette produkt må ikke bruges, hvis det er defekt. Hvis der konstateres unormale fænomener eller unormale lyde, skal det straks stoppes for inspektion, og arbejdet kan genoptages efter fejlfinding. Operatøren skal være fortrolig med de forholdsregler, der er beskrevet i hvert afsnit af manualen, for at sikre personers og produktets sikkerhed.
 - Dette produkt er udstyret med en treledet strømledning. Strømledningen skal tilsluttes en trehulsstikkontakt, der er korrekt installeret og jordforbundet. Dette er ikke kun for at forhindre risikoen for elektrisk stød, men også for at sikre, at produktet kan fungere korrekt.
 - Betjen produktet i nøje overensstemmelse med advarselsmærkaten, der er påtrykt det.
 - Under styring af løftet skal knappen holdes nede, indtil produktet er i en passende position.
- Vær opmærksom på, at den kontinuerlige driftstid skal være maks. 2 min. TIL; 18 min. FRA, når motoren er i drift.
- Vedligeholdelse skal udføres af uddannede fagfolk.
- Efter hver behandling må der kun anvendes en neutral opløsning til at fjerne støv eller pletter på produktet.
- Når du justerer de enkelte dele, skal du holde hænder, fødder og hoved væk fra den position, der er angivet med pilen. (Som vist på billedet)
 -

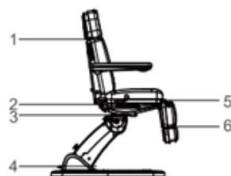


4. Installation

1. Placer produktet på et passende sted i henhold til den generelle indretning, dagslyset eller den kunstige belysning og driftsforholdene i salonen eller hjemmet. Opbevar det i et rent, tørt og køligt miljø.
2. Åbn emballagen for at kontrollere, om produktet er intakt, og om tilbehør eller reservedele er komplette. Kontakt distributøren eller os, hvis der er problemer.
3. Installation

Placer produktet på det rette sted. Bemærk, at det ikke er nødvendigt at montere ekstra skruer på gulvet for at fastgøre sengen, da det originale design har taget højde for stabiliteten.


Sørg dog for, at produktet placeres på et fast og plant underlag for at forhindre ulykker. Hvis produktet roterer eller hælder på grund af ujævnt underlag, skal du justere de fire plastikfodder (M10×30) og møtrikker (M10) med en sekskantet skruenøgle, som er fastgjort på bundpanelet, for at sikre, at produktet står stabilt.
4. Tilslut produktets stik korrekt til strømforsyningen. (Som vist på billedet)

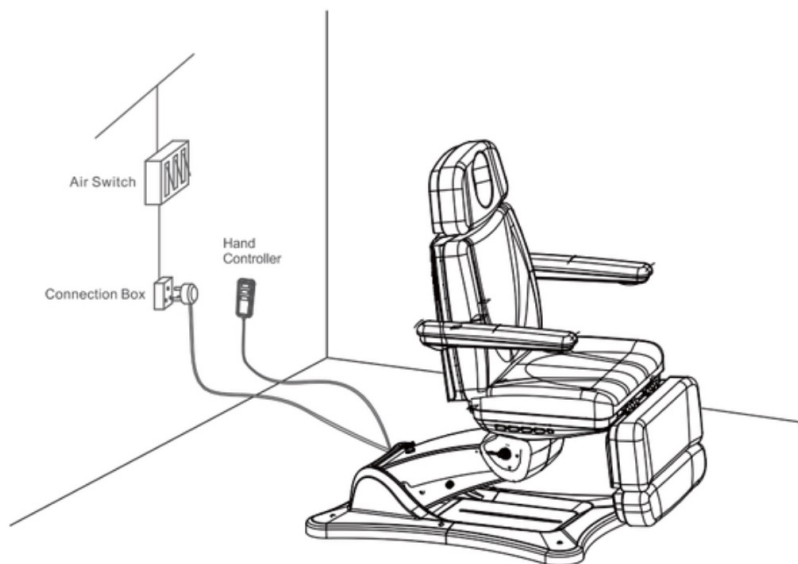


5. Produktets struktur

- Dette produkt består af kontrolboks, motor, trædel, hardware, plastdele og læder. Blandt disse styrer kontrolboksen driften af motorerne og håndkontrollen.
- Dette produkt omfatter vinkeljustering af ryglænet, vinkeljustering af sædehynden og løftejustering, som er en samlet og integreret konstruktion.
(Som vist på billedet)

2246BN

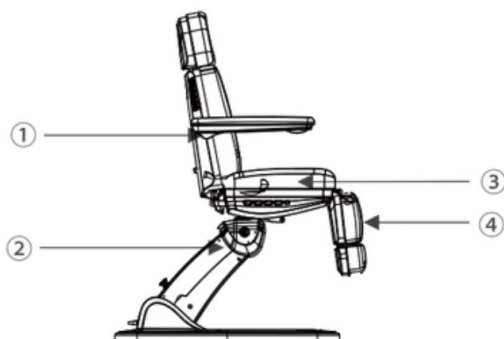

2246EBN


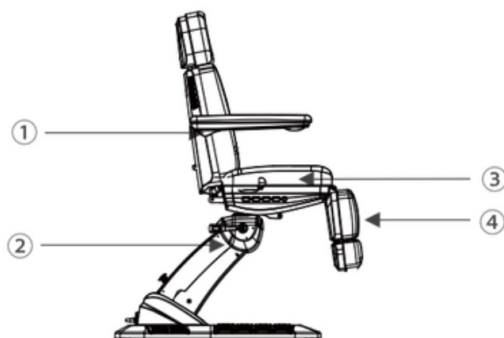


- ① vinkeljustering af ryglænet
- ② løftejustering
- ③ vinkeljustering af sædet
- ④ vinkeljustering af fodstøtten

6. Betjeningsvejledning

2246BN/2246EBN

Standardkonfiguration (nøglekontakter)

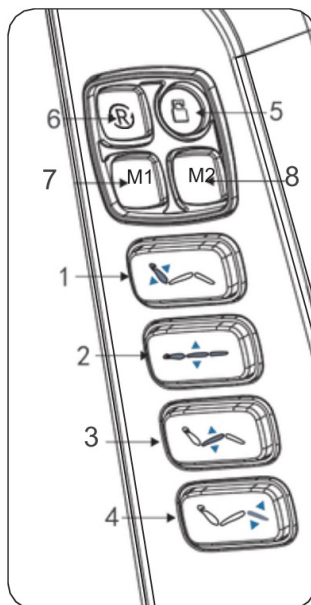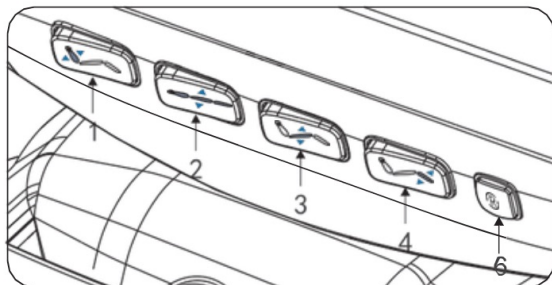

No.	Description	Operation
1	Knap til justering af ryglæn	Tryk på knappen til højre (venstre), ryglænet bevæger sig op (ned), vinklen øges (mindskes) med konstant hastighed.
2	Højdejusteringsknap	Tryk på knappen til højre (venstre), sædet bevæger sig op (ned), højden øges (mindskes) med konstant hastighed.
3	Sædejusteringsknap	Tryk på knappen til højre (venstre), sædet vippes bagud. Højden øges (mindskes) med konstant hastighed.
4	Fodstøttejusteringsknap	Tryk på knappen til højre (venstre), benstøtten bevæger sig op (ned), vinklen øges (mindskes) med konstant hastighed.
5	Knap til sikkerhedslås	Hold "sikkerhedslåseknappen" nede i cirka tre sekunder, så det røde lys omkring knappen tændes. Alle knapper undtagen sikkerhedslåseknappen kan nu betjenes. Hold sikkerhedslåseknappen nede i cirka tre sekunder igen, så det røde lys slukkes, og alle knapper vender tilbage til normal drift.
6	Én-tast nulstillingsknap	Tryk på knappen, så sengen automatisk sænkes til den laveste position.
7	Indstilling af hukommelsesposition	Hukommelse/programmerbar positionsindstilling: Når stolen er justeret til den ønskede position, skal du trykke på "M1"-knappen i 2-3 sekunder. Når der lyder et "bip...bip...bip", betyder det, at positionen er indstillet korrekt.


8

Indstilling af hukommelsesposition 2


Hukommelse/programmerbar positionsindstilling: Når stolen er indstillet til den ønskede position, skal du trykke på knappen "M2" i 2-3 sekunder. Når der lyder et bip...bip...bip, betyder det, at positionen er indstillet korrekt.

2246EBN


1. Standard Configuration (Built-in Foot Controller)

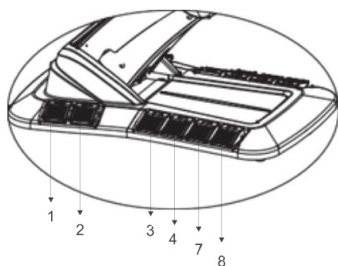

2. Optional Configuration (Hand Controller)

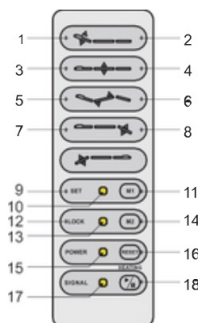

3. Optional Configuration (Foot Controller)

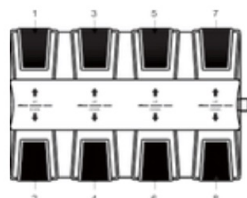

No.	Beskrivelse	Betjening
1	Ryglænet bevæger sig op	Ryglænet går jævnt op ved tryk på knappen.
2	Ryglænet bevæger sig ned	Ryglænet går jævnt ned ved tryk på knappen.
3	Hele sengen bevæger sig op	Sengen går jævnt op ved tryk på knappen.
4	Hele sengen bevæger sig ned	Sengen går jævnt ned ved tryk på knappen.
5	Sædepuden bevæger sig op	Sædet holder jævnt op ved tryk på knappen.
6	Sædepuden bevæger sig ned	Sædet går jævnt tilbage til flad position ved tryk på knappen.
7	Fodstøtten bevæger sig op	Vinklen på højre fodstøtte mindskes jævnt ved tryk på knappen.
8	Fodstøtten bevæger sig ned	Vinklen på højre fodstøtte øges jævnt ved tryk på knappen.
9	Åbn indstillingen for hukommelsesposition (valgmulighed)	Indikatorlyset tændes, når knappen holdes nede i 2 sekunder, hvorefter du går ind i hukommelsespositions-indstillingen.
10	Indikatorlys for hukommelsesindstilling (valgmulighed)	
11	Hukommelsespositionsindstilling 1 (valgmulighed)	1. Tryk på knappen "SET" i 2 sekunder for at gå ind i hukommelsespositions-indstillingen. Indikatorlyset for hukommelsespositionen tændes. Indstil den ønskede position, og tryk derefter på knappen "M1" – handlingerne gemmes i hukommelsen. 2. Når du forlader hukommelsespositions-indstillingen, slukkes indikatorlyset. Tryk på knappen for automatisk at gå til hukommelsespositionens handlingstilstand.


Nr.	Beskrivelse	Betjening
12	Sikkerhedslåseknop	Hold "sikkerhedslåseknappen" nede i ca. to sekunder, så det røde lys omkring knappen tændes. Alle knapperne undtagen sikkerhedslåseknappen kan nu betjenes. Hold sikkerhedslåseknappen nede i ca. to sekunder igen, så det røde lys slukkes, og alle knapperne til normal drift.
13	Lys i sikkerhedslåseknop	
14	Hukommelsespositionsindstilling 2 (valgmulighed)	- Tryk på knappen "SET" i 2 sekunder for at gå ind i hukommelsespositions-indstillingen. Indikatorlyset for hukommelsespositionen tændes. Indstil den ønskede position, og tryk derefter på knappen "M2" – handlingerne gemmes i hukommelsen. Når du forlader hukommelsespositions-indstillingen, slukkes indikatorlyset. - Tryk på knappen for automatisk at skifte til hukommelsespositionens handlingstilstand.
15	Strømindikator	Hvis håndbetjeningen er korrekt tilsluttet strømforsyningen, tændes indikatorlyset. Ellers vil det ikke lyse.
16	Én-tast nulstillingsknop	Tryk på knappen, så sænkes sengen automatisk til den laveste position.
17	Indikatorlys for varmfunktion (valgmulighed)	Når der trykkes på knappen, tændes lyset, og varmfunktionen aktiveres. Trykkes der på knappen igen, slukkes lyset, og varmfunktionen stopper.
18	Varme (valgmulighed)	


Notes:

- 1
- Opvarmningsfunktionen er kun tilgængelig på modeller med opvarmningsfunktion.
- 2
- Der skal vælges forskellige håndbetjeningen alt efter den enkelte konfiguration.


Justerbar nakkestøtte

Drej kontakten til højre for at låse op. Juster derefter nakkestøttens højde op og ned. Drej kontakten til venstre for at låse nakkestøtten igen

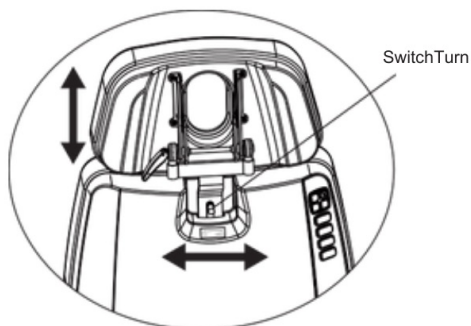


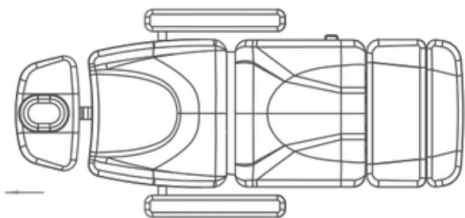

1. Skub nakkestøtten ca. 50 mm tilbage

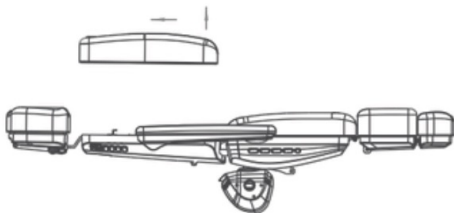


2. Fjern ryglænsputen som vist ovenfor

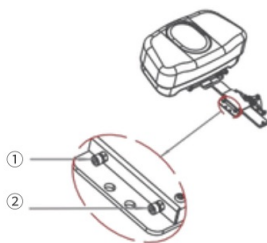

3. Brug en åben og sekskantet skruenøgle til at stramme og fastgøre skruerne i positionerne

① og ② som vist

Justering af belysning

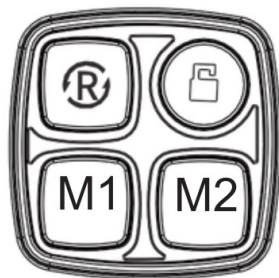


Justeringen styres med knapper på ryglæn og sæde.

1. Tryk kort på knappen "  " for at gå til lysjusteringsfunktionen. Lyset omkring knapperne vil blinke
 2. Tryk på knappen "M1" for at ændre farven (i alt 16 forskellige tilstande)
 3. Tryk på knappen "M2" for at ændre lysstyrken (i alt 12 forskellige indstillinger).
 4. Indstil den ønskede lysfarve og lysstyrke, og tryk på knappen "  " igen for at afslutte lysjusteringsfunktionen
- . Hvis der ikke foretages nogen handling inden for 10 sekunder, afsluttes lysindstillingsfunktionen automatisk.

Styring med håndbetjening 1.Hold "SET"/"LOCK" nede i 2 sekunder for at gå ind i lysreguleringsfunktionen 2.Tryk på "M1" for at vælge lysindstillingen (i alt 16 forskellige indstillinger) 3.Hold "M2" nede for at justere lysstyrken (i alt 12 indstillinger). 4.Når du har valgt lysindstilling og lysstyrke, skal du holde "SET"/"LOCK" nede for at

afslutte lysjusteringen.

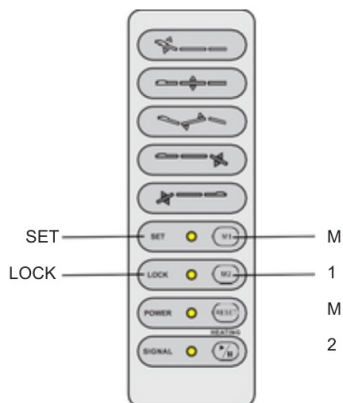

7. Forsigtighedsregler ved betjening




NO SITTING




Undlad at sætte dig på ryglænet/fodstøtten eller springe op på ryglænet/fodstøtten for at undgå risikoen for at falde på grund af brud på ryglænets/fodstøttens samling som følge af stor belastning.

● Nødstop


Giveroperatøren mulighed for straks at stoppe sengen i tilfælde af en uventet situation.

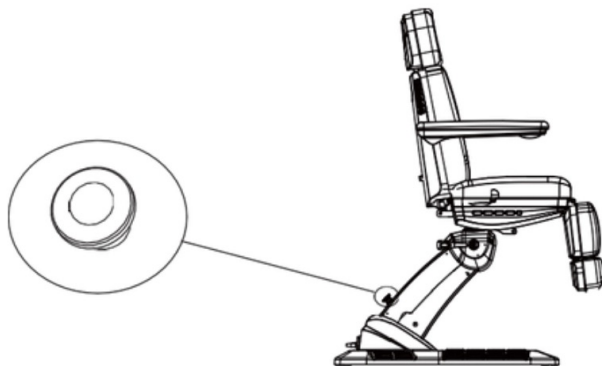


● **Retningslinjer : Udskift drejebordblokken**

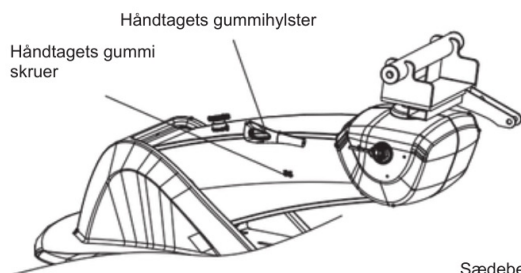

Løsn skruerne på håndtagets gummi hylster, træk håndtagets gummi hylster ud

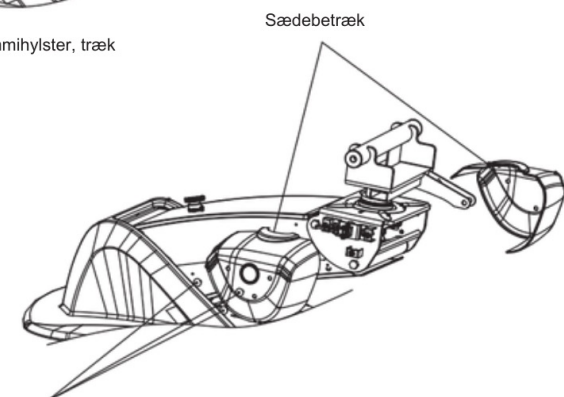


Træk plastskruerne ud, fjern sædebetrækkene

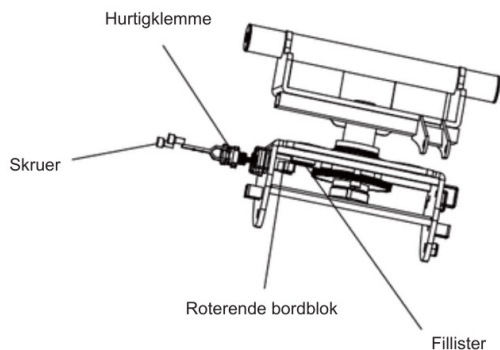

Løsn skruerne, træk Quick Clip og drejebordblokken ud af Fillister.



Drej Quick Clip for at fjerne den ødelagte roterende bordblok og udskift den med en ny.

• **Retningslinjer: Udskiftning af pude**

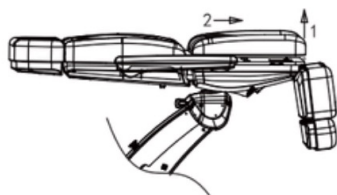

Sædestøtte:

Juster benstøtten og ryglænet som vist på billedet. Træk derefter enden af sædestøtten (nær benstøtten) op i retning 1 og skub den i retning 2 for nemt at fjerne puden.

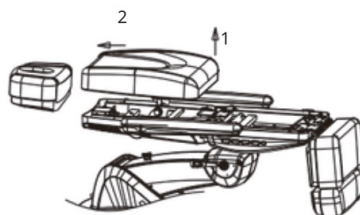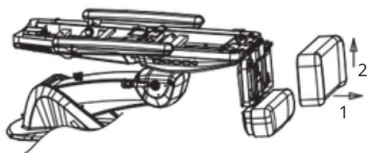


Ryglæn:

Træk enden af ryglænet (tæt på sædepuden) opad. Skub det derefter fremad for at fjerne puden.

Fast fodstøtte:

Træk enden af den faste fodstøtte (nær den bevægelige fodstøtte) op. Træk den derefter opad for at fjerne puden.

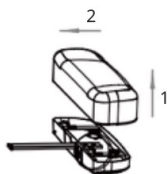

Udskift fodstøttepuden: Følg figuren og træk enden af puden op



Hovedstøtte:



Træk plastdækslet ud, og brug en skruetrækker til at udskifte hovedstøttebeslaget med et nyt

8. Tekniske parametre



Strøm	AC 100-120V eller AC 220-240 V eller AC 100-240 V, 50/60
Maksimal effekt	Hz 300 W
Omgivelsestemperatur	0°C~+ 40°C
Relativ luftfugtighed	30 %~90
Nominel løfteevne	200 kg
Pakningsstørrelse	

Rotation



-120~+120°

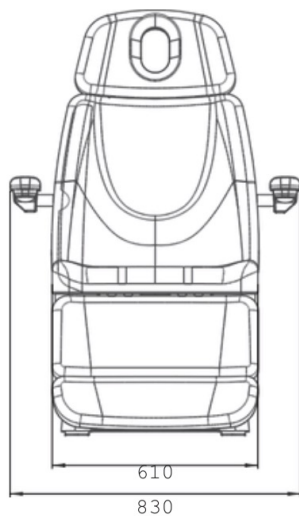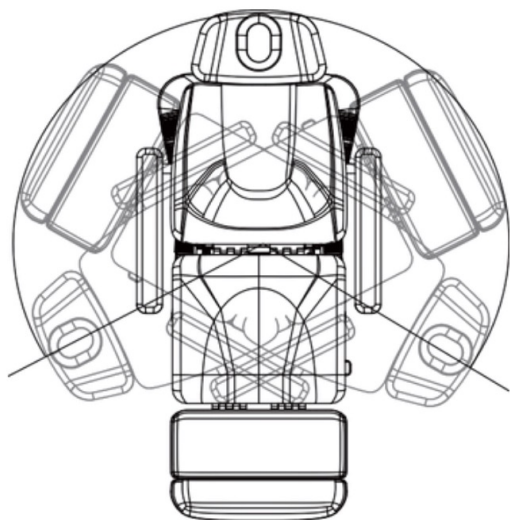

2246BN

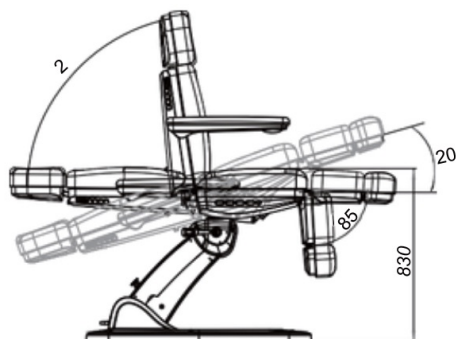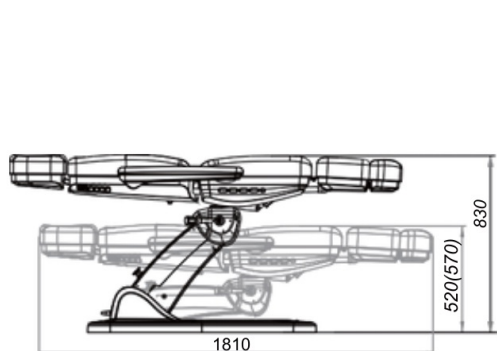

2246EBN

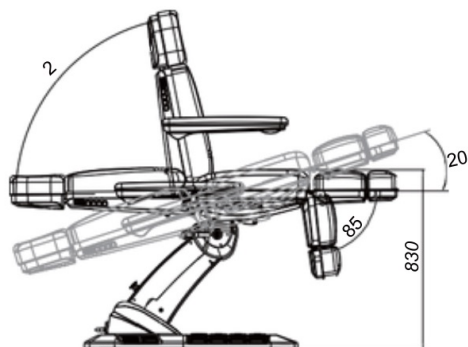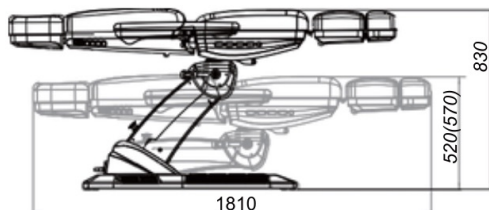


9. Vedligeholdelse

1. Efter hver behandling skal du kun bruge en neutral opløsning til at fjerne støv og pletter på læder, metaldele eller andre dele. Desinficerende opløsninger som alkohol, syre eller alkaliske opløsninger er forbudt. Dette er for at forhindre, at komponenternes levetid forkortes.
2. Smør de bevægelige dele regelmæssigt (en gang om året).
3. Efter brug skal polstringen holdes flad i 180°.
4. Hvis nakkestøtten sidder fast, kan det afhjælpes ved at påføre smørelolie .

10. Tilslutningsdiagram for kredsløbssystem

2246BN


Kredsløbssystemdiagram

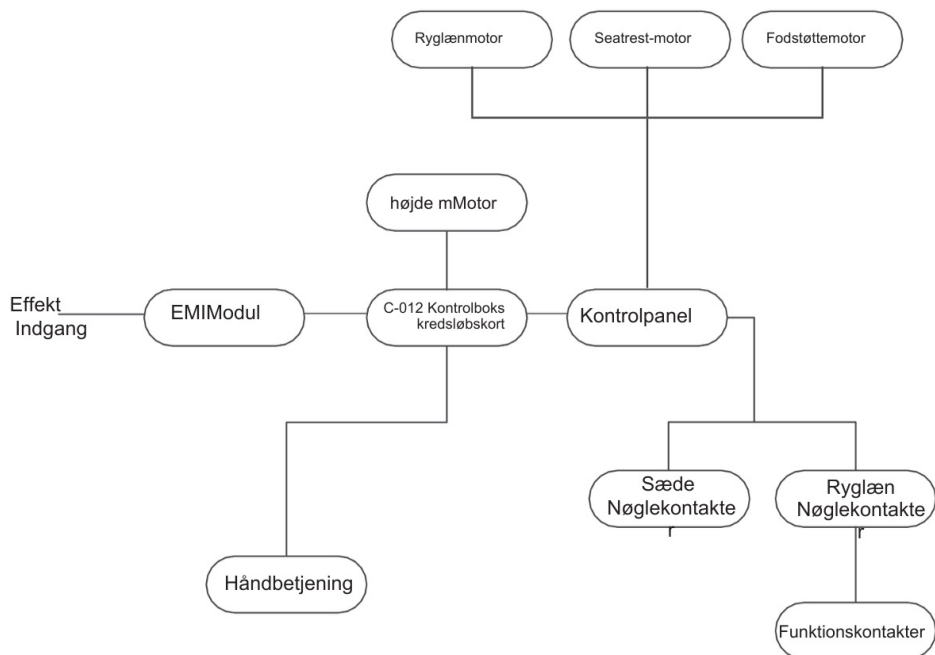

10. Tilslutningsdiagram for kredsløbssystem

2246EBN

Kredsløbssystemdiagram

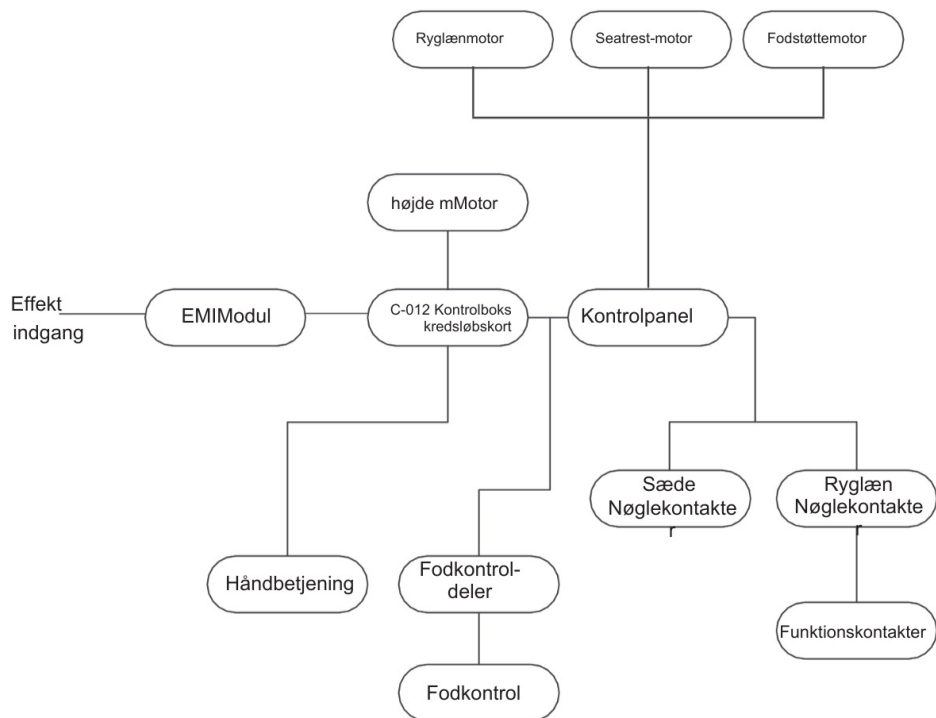

12. Fejlfinding

Fejlfænomen	Årsag	Løsning
Motoren fungerer ikke normalt	1. Strømkablet er ikke tilsluttet eller ikke tilsluttet korrekt.	Tilslut strømkablet, eller sørg for, at det er tilsluttet korrekt.
	2. Dårlig kvalitet af håndkontrollen eller fodkontrollen.	Udskift håndkontrollen eller fodkontrollen.
	3. Dårlig kvalitet af kontrolboksen.	Kontakt vedligeholdelsescenteret eller leverandøren for fejlfinding.
	4. Brud på motorens hale.	
	5. Motoren er beskadiget.	
	6. Nødstopknappen er blevet trykket ned, men ikke nulstillet.	Nulstil nødkontakten.
Unormal lyd	1. De roterende dele mangler smøreolie.	1. Tilsæt smøreolie.
	2. De roterende dele (f.eks. hængsler, POM-sæt, gaslift) mangler smøreolie.	2. Tilsæt smøreolie.
	3. Motorens kvalitet er ikke god nok.	3. Udskift motoren.

Hvis problemet stadig ikke er løst efter ovenstående handlinger, skal du kontakte vedligeholdelsescentret eller leverandøren for at få det løst.

3. Dårlig kvalitet af kontrolboksen.

4. Brud på motorens hale.

5. Motoren er beskadiget. 6.

Nødstopknappen er blevet trykket ned,



Do not dispose of old or defective appliances in domestic garbage; this should only be done through public collection points.

▲ Please check the product specification before use. This manual is for reference only. Specifications are subject to change without prior notice.